

CPR_ROBOTV3.1 -- User Manual

Student information & Screen video recording

สามารถพิมพ์ เพิ่ม / แก้ไข ข้อมูลได้
หลังจากนั้น กด SAVE

2

STUDENT_DATABASE

1

เลือกไฟล์จากฐานข้อมูล

** หากยังไม่ได้เลือกไฟล์ จะไม่สามารถ SAVE ข้อมูลได้

The screenshot shows the CPR_ROBOT_V3.1 software interface. The top bar includes a menu icon, the SCE Lab. logo, and window controls. The main area is divided into three panels. The left panel, 'Student Information', contains input fields for Name, Surname, ID, Training case, and Status, with a 'SAVE' button at the bottom. The middle panel, 'CPR Scenarios', displays 'Fetal Heart Rate (0-200 /min)' and 'Respiratory rate (0-100 /min)' with numerical values (0) and units (BPM, RR). The right panel shows a video recording area with a camera icon and 'TIME: 14:44' and 'REC: ---' indicators. At the bottom, there are buttons for 'Data Base', 'Clear', and navigation arrows, along with a 'STATUS' indicator and a 'CONNECT' button.

สามารถเลื่อนเพื่อเพิ่ม / หรือแก้ไขข้อมูลของคนถัดไปได้


CPR_ROBOTV3.1 -- User Manual

Student information & Screen video recording

ตัวอย่าง Traning Report สามารถกดปุ่ม Report เพื่อสร้างไฟล์ PDF

Training Informations


Document Date: 19-11-2023 / Time: 14.50



No.	ID	Name	Surname	Training Case	Status
1	ID55	AAA	BBB	1.0	8.5
2	ID2566	AAA	CCC	2.0	11.5
3					

CPR_ROBOTV3.1 -- User Manual

Student information & **Screen video recording**

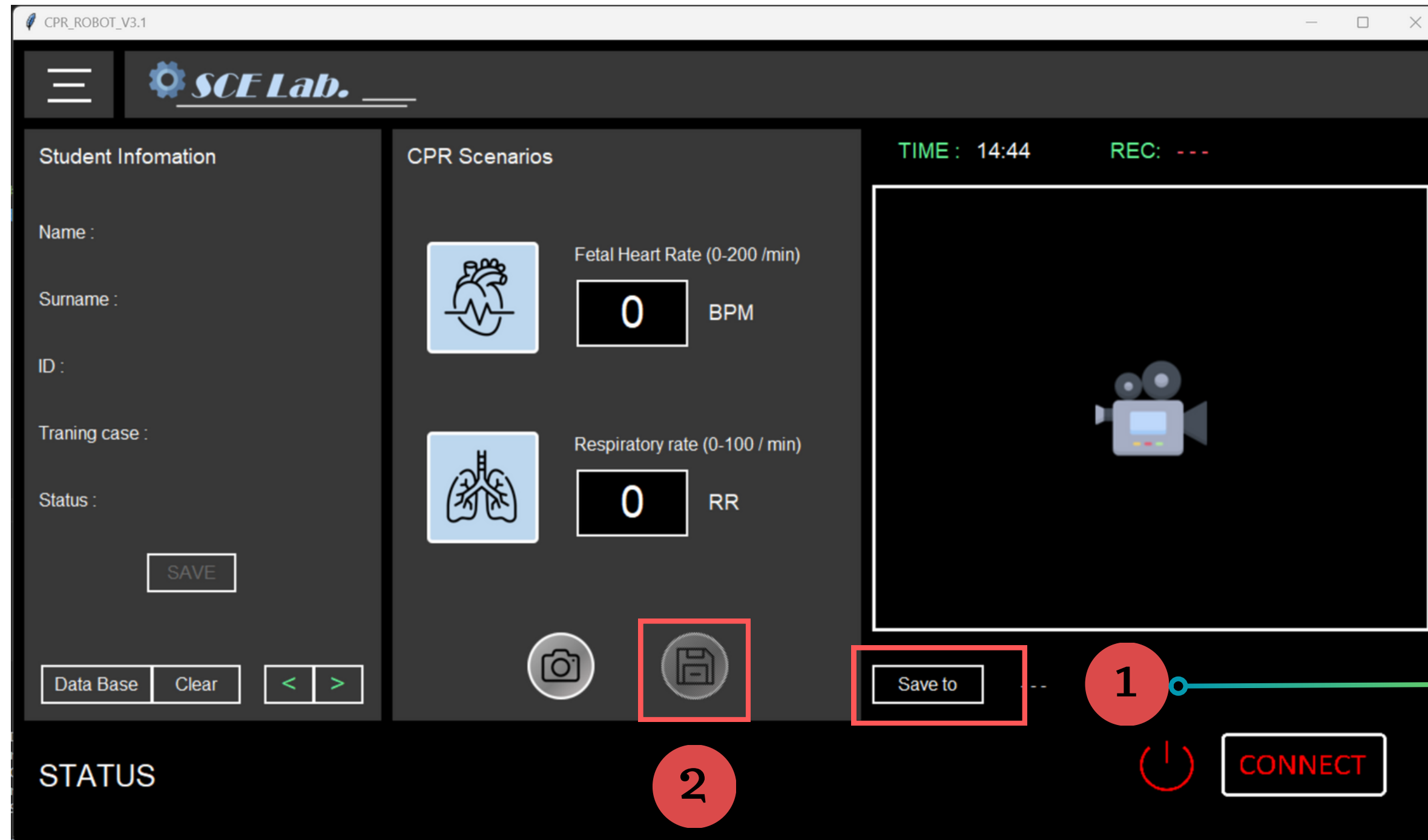

เลือกที่อยู่ในการจัดเก็บไฟล์ / ตั้งชื่อไฟล์

หลังจากเลือกที่อยู่ไฟล์ จึงจะสามารถเริ่มกด บันทึก Video หน้าจอได้